

ZATOGRIP^{MD}

gardło



spray
3+

Instrukcja używania

lekam

Wyrób medyczny

*Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne dla pacjenta informacje o zastosowaniu wyrobu **Zatogrip MD Gardło Spray**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.*

Instrukcja używania

Zatogrip MD Gardło Spray

Wyrób medyczny
30 ml

REF

ENT43

1. Co to jest wyrób medyczny **Zatogrip MD Gardło Spray**?

Zatogrip MD Gardło Spray to wyrób medyczny w postaci sprayu zawierający m.in. **PVP (poliwinylpirolidon)**, **tyndalizowane (niezdolne do życia) bakterie kwasu mlekowego *Lactobacillus rhamnosus***, **glicerynę**, **ksyliitol**, który powleka błonę śluzową jamy ustnej i gardła tworząc ochronny film.

Dzięki działaniu nawilżającemu utrzymuje elastyczność błon śluzowych, co skutecznie łagodzi podrażnienia oraz dyskomfort związany z suchością w jamie ustnej.

Zatogrip MD Gardło Spray ogranicza kolonizację drobnoustrojów patogennych, dzięki czemu zapewnia lepsze warunki do regeneracji błony śluzowej i przyspiesza przywrócenie fizjologicznej flory jamy ustnej i gardła.

Wyrób medyczny utrudnia przyleganie bakterii do powierzchni szkliwa zębów, a tym samym zmniejsza ryzyko powstawania próchnicy.

Zatogrip MD Gardło Spray można stosować profilaktycznie u osób, które narażone są na działanie drażniących czynników zewnętrznych np. klimatyzacja, zanieczyszczone powietrze, dym nikotynowy. Preparat o odświeżającym malinowo-miętowym smaku.

2. W jakim celu stosuje się wyrób?

Zatogrip MD Gardło Spray jest polecany w następujących przypadkach:

- wspomagająco w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, związanych z infekcją wirusową, bakteryjną lub grzybiczą;
- w celu łagodzenia objawów takich jak: suchość w jamie ustnej, suchy kaszel, drapanie w gardle, problemy z połykaniem;
- przy suchości błon śluzowych w wyniku stosowania leków (np. przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe);
- pomocniczo w stanach zapalnych dziąseł;
- zapobiegania próchnicy;
- zapobiegania tworzenia płytki nazębnej;
- profilaktycznie po zabiegach stomatologicznych.

3. Dawkowanie i sposób podania wyrobu **Zatogrip MD Gardło Spray**.

Zatogrip MD Gardło Spray należy aplikować zgodnie z instrukcją używania. Preparat do stosowania miejscowego na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Dzieci od 3. roku życia do 6. roku życia: 1 dawka, 3 razy dziennie po posiłku lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli: 2-3 dawki, 3 razy dziennie po posiłku lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób użycia:

Przed każdym użyciem wyrobu należy dokładnie umyć ręce. Każdorazowo wstrząsnąć przed zastosowaniem. Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Wyrób należy aplikować w pozycji pionowej. Umieścić aplikator w jamie ustnej. Preparat rozpylić na tylną ścianę gardła. Czynność powtórzyć odpowiednią ilość razy.

4. Ostrzeżenia

Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.

W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem (nie ściągać, nie odkręcać).

Nie aplikować preparatu w pozycji leżącej, ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna przed zastosowaniem tego wyrobu poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia wyrób medyczny powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Unikać kontaktu z oczami.

Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu oraz gdy opakowanie jest uszkodzone.

Nie stosować z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.

Po zastosowaniu preparatu na podrażnioną śluzówkę jamy ustnej może wystąpić uczucie pieczenia, które powinno samo przemijać. Jeżeli trwa dłużej należy skonsultować się z lekarzem.

5. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (alergia) na jakikolwiek składnik wyrobu.

6. Jak przechowywać wyrób Zatogrip MD Gardło Spray?

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. Skład wyrobu Zatogrip MD Gardło Spray.

Poliwinylopirolidon, tyndalizowane bakterie kwa-

su mlekowego *Lactobacillus rhamnosus* HA-111, woda, gliceryna, ksylitol, chlorek benzalkoniowy, aromat malinowy, aromat miętowy.

8. Opis opakowania

Zatogrip MD Gardło Spray pakowany jest w plastikowe butelki z 30 ml wyrobu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, butelkę z wyrobem oraz instrukcję używania.

Wytwórca:

Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Górników 21/26
30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl

Wyprodukowano dla:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa



Symbole stosowane na opakowaniu

	Wytwórca
	Data ważności
	Numer serii
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Temperatura przechowywania
	Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Numer katalogowy

Data opracowania instrukcji używania: kwiecień 2024
ZTGP/IU/04/2024